



ООО «Медтехника МОСКВА»

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
р/с: 40702810600000002642 в КБ «КРЕДИТИМПЭКС БАНК» (ООО)
г. Москва, к/с: 30101810400000000257 БИК 044579257
тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru

Паспорт изделия

Каталка YDC-3A (упаковка 2 - приемное устройство) для АСМП (автомобилей скорой медицинской помощи)

1. Введение

Представленная здесь информация является частью руководства к каталке YDC-3A, пожалуйста, прочтите описание внимательно, так как здесь представлена важная информация о безопасном использовании и процедуре технического обслуживания.

Описание и рисунки в руководстве не являются обязательными, производитель имеет право изменять любую информацию в руководстве, целью является обновление руководства и улучшение качества продукции.

Справочник по графике и изображениям всего лишь пример, продукция также может быть улучшена в будущем.

2. Сфера применения

Приемное устройство каталки YDC-3A в основном используется для погрузки/выгрузки каталки в АСМП

3. Характеристики

- 3.1. Поверхность приемного устройства каталки изготовлена из нержавеющей стали.
- 3.2. Платформа приемного устройства каталки может двигаться влево и вправо, что делает пространство АСМП более удобным для размещения пациента и персонала.
- 3.3. Приемное устройство оснащено местом под спинные доски.

4. Технические параметры (Погрешность $\pm 5\%$)

Модель приемного устройства	YDC-3A
Размер (Д×Ш×В)	203 * 57,8 * 12,5 см
Вес нетто	57 кг
Грузоподъемность	230 кг

5. Метод использования

- 5.1 Приемное устройство каталки должно быть надежно закреплено к кузову АСМП.
- 5.2 Откройте трап приемного устройства каталки. Рис.1
- 5.3 Закатите каталку на платформу приемного устройства. Затем зафиксируйте. Рис.2
- 5.4 Поднимите до фиксированного положения трап приемного устройства каталки. Рис.3
- 5.5 При нажатии на красную педаль приемное устройство каталки может двигаться влево и вправо, при отпускании педали платформа фиксируется.

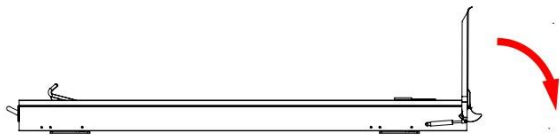


Рисунок 1

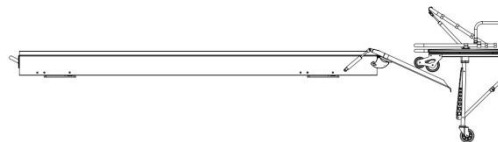


Рисунок 2

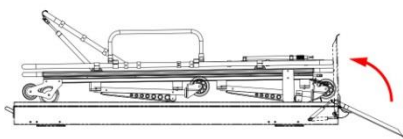


Рисунок 3

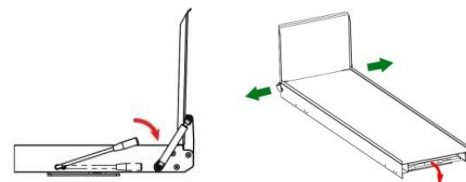


Рисунок 4

6. Обслуживание и уход

- 6.1 Содержите каталку и приемное устройство в чистоте. Регулярно мойте и дезинфицируйте изделия.
- 6.2 Проверьте регулярно все резьбовые соединения. Смазывайте по необходимости.

Внимание! Не используйте каталку и/или приемное устройство, если обнаружили отсутствие каких-либо деталей. Обратитесь в обслуживающую организацию или вашему дилеру для ремонта.

Внимание: До использования фиксирующих устройств каталки, убедитесь, что устройства не ослаблены. Вы должны убедиться, что винты затянуты до использования. Ознакомьтесь и следуйте инструкции для правильной эксплуатации, и после этого перевозите пациентов.

7. Хранение

- 7.1 Храните каталку и приемное устройство в сухом и не коррозионном месте.
- 7.2 Хранить и перевозить приемное устройство каталки так, как указано на упаковке.

8. Транспортировка

- 8.1 Транспортировать следует обычным транспортом: самолетом, кораблем или автотранспортом.
- 8.2 Каталку и приемное устройство можно переносить вручную.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления.

Внимание: инструмент для сборки не входит в комплект поставки

9. Гарантия

Гарантийный срок составляет **12 месяцев** со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Дата продажи: «_____» _____ 201__ г.

Печать, подпись _____